


# INSTRUCCIONES DE AJUSTE

Sostenga el respirador con sus manos como muestra la gráfica con la yema de sus dedos en la copa nasal y las bandas elásticas suspendidas libremente debajo de su mano.

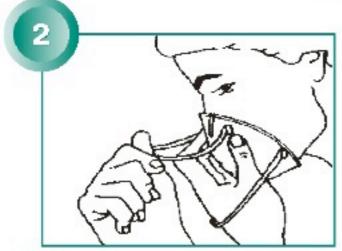

### Paso 2

Ubique el respirador bajo su barbilla con el clip nasal hacia arriba. Lleve la banda superior hacia la coronilla de la cabeza.



#### Paso 3

Lleve la banda inferior sobre su cabeza y ubíquela alrededor de su cuello y debajo de sus orejas.



## Paso 4

Ajuste las bandas para la cabeza de modo en que se sienta más cómodo. Presione simultáneamente con los dedos el clip nasal para lograr un ajuste perfecto al contorno de su nariz.

## Advertencia:

Cada vez que se use el respirador, se debe realizar una verificación del ajuste. Ubique ambas manos sobre el respirador cubriéndolo totalmente y exhale. Si el aire se fuga alrededor de la nariz o de los bordes, ajuste la parte correspondiente a la nariz y/o bandas hasta lograr ajustarlo correctamente. Entrar en un área contaminada con un ajuste inefectivo, podría causar enfermedad o muerte.

OS&H. Carrera 70 D No. 50 – 42 Tels. (57 1 ) 263 25 00 Bogotá, Colombia Email: <a href="mailto:ventas@osh.com.co">ventas@osh.com.co</a> WEB SITE: <a href="http:///www.osh.com.co">http:///www.osh.com.co</a>